

AIRLIFE

Humidificador Prellenado (Catálogo: 002620)



Descripción

- Humidificador de burbuja prellenado con agua estéril para inhalación. Sin Preservantes, aditivos ni sustancias pirogénicas.

Beneficios

- Seguridad al paciente
 - Impide recargas evitando el riesgo de infecciones asociadas a la manipulación
 - De fácil almacenamiento y distribución por su diseño compacto
 - Permite versatilidad en el tratamiento de pacientes que requieran humidificación al suministrar oxígeno
- Permite prolongar su uso por más de 7 días, sin cambio por su seguridad y nula manipulación, lo que conlleva también una disminución en los costos asociados

Características

- Válvula de escape de presión de 4PSI con alarma audible
- Alarma audible frente a oclusiones en el tubo de suministro por parte del paciente
- Salida multiángulo que impide filtración, incluso a altos flujos de oxígeno, así como el ingreso y colonización de microorganismos
- Apertura pequeña de la botella para evitar su manipulación o recarga
- Volumen de 500mL

Instrucciones para su uso

- 1.- Retirar el envoltorio plástico que lo protege
- 2.- Romper el seguro de la boquilla posterior hilada
- 3.- Colocar el adaptador adjunto, en la boquilla posterior
- 4.- Romper el sello de la boquilla anterior y en él, conectar el tubo de suministro de oxígeno